

PARATHORMONIN NÄYTTEENKÄSITTELY- JA LÄHETYSOHJEET OVAT MUUTTUNEET

Parathormonin **fP-PTH (tutkimusnumero 4560)** näytteenkäsittely- ja lähetysohjeet ovat muuttuneet PTH:n säilyvyydessä ilmenneiden ongelmien vuoksi. PTH:n säilyvyys plasmassa on parempi kuin seerumissa.

Uudet näytteenkäsittely- ja lähetysohjeet

Plasma erotetaan mahdollisimman nopeasti. EDTA-plasma säilyy yhden vuorokauden jääkaapissa, pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Lähetysohjeeksi kylmälähetyksenä, jos perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten pakastettuna.

Uuden ohjekirjan ilmestymisen myötä on Multilab-järjestelmään jouduttu päivittämään nämä muutokset jo aikaisemmin.

Henrik Alfthan
kemisti
HYKS-laboratoriodiagnostiikka
Naistenklinikka
puh. (09) 471 61457

Päivi Lakkisto
sairaalalääkäri
HYKS-laboratoriodiagnostiikka
Naistenklinikka
puh. (09) 471 62501