

Haimaperäisen peptidin tutkimuspyyntö ja näyteastia muuttuvat

Tutkimus	4628	fS-PP	fS -Haimaperäinen peptidi
Asia	Pyyntökäytäntömuutos Näyteastiamuutos Tutkimuspyyntö Haimaperäinen peptidi, fS-PP, KL 4628 korvaa aiemmin käytössä olleen tutkimuspyynnön P –PP, KL 1510. Siirrymme käyttämään näytetyyppinä paastoseerumia (fS) aiemmin käytössä olleen plasmanäytteen asemesta. Tästä johtuen myös näyteastia muuttuu. Menetelmä, viitearvot ja tuloksen tulkinta pysyvät ennallaan. Muutokset tulevat voimaan 18.4.2005 alkaen.		
Näyteastia	Seerumiputki 5 ml		
Näyte	2 ml paastoseerumia. Näytteenotto ja erotus mielellään kylmässä, pakastus 4 tunnin kuluessa. Näyte jaetaan kahteen muoviputkeen. Lähetys pakastettuna.		
Tiedustelut	Yhteyshenkilö/HUSLAB Nkl:n Laboratorio Ulla Hohenthal kemisti puh. (09) 471 73658 tai 050 427 1458		
Jakelu	Laboratoriojakelu HUSLABin Intranet –sivut HUSLABin Internet –sivut		