

Seerumin kinidiinitutkimuksen tekopaikka ja viitearvot muuttuvat

Tutkimus	2054	S -Kinid	S -Kinidiini
Asia	Viitearvomuuotos Tekopaikkamuutos Lopetettu tutkimus Meilahden sairaalan päivystyslaboratoriossa lopetetaan seerumin kinidiinin (S - Kinid, KL 2054) tutkimus vähäisen kysynnän vuoksi. Tutkimus teetetään jatkossa alihankintana KYS:n Kliinisen kemian osastolla. Menetelmä on edelleen immunofluorometrinen, mutta terapeuttisen ja toksisen alueen pitoisuudet muuttuvat. Muutos astuu voimaan 31.5.2005 alkaen.		
Näyteastia	5 ml seerumiputki (huom. ei geeliä)		
Näyte	0.5 ml seerumia. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.		
Menetelmä	Immunofluorometrinen.		
Viitearvot	<i>terapeuttinen alue</i> 6 – 15 $\mu\text{mol/l}$ <i>toksinen alue</i> yli 20 $\mu\text{mol/l}$		
Tiedustelut	Kuopion yliopistollinen sairaala, Kliinisen kemian osasto, puh. (017) 173 205		
	Kari Pulkki osastonylilääkäri Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 61252		Tessa Lehtinen sairaalakemisti Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 72573
Jakelu	Laboratoriojakelu HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot H:gin terveysasemien ylilääkärit HUSLABin Intranet-sivut HUSLABin Internet-sivut Ulkopuoliset asiakkaat		