

Pt-Gastropaneeli (Pt-Gastro, Atk-no 9445) muuttuu Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa ja Vantaan terveysasemilla 24.4.2005 alkaen

Gastropaneeli:	9448	fP-Gastr17	fP-Gastriini-17
vanhat tutki-	9954	fP-HepyAbG	fP-Helicobacter pylori, IgG vasta-aineet
mukset	23054	fP-Pepsin 1	fP-Pepsinogeeni I
Gastropaneeli:	23055	fP-Pepsin 2	fP-Pepsinogeeni II
uusi tutkimus			

Asia Pt-Gastropaneelissa tulee muutoksia **24.4.2005 alkaen**.

Paketissa tapahtuvat muutokset ovat seuraavat:

- Plasman Pepsinogeeni II tutkimus on lisätty tutkimuspaneeliin
- Näytemuoto muuttuu plasmaksi.
- Näytettä ei enää tarvitse pakastaa. Näyte säilyy huoneenlämmössä kolme vuorokautta, kun siihen lisätään stabilaattoria (Biohit, Gastrin 17 stabilizer, no 601 050)
- Gastriinitutkimuksen proteiinistimulaatiosta luovutaan. Gastriini määritetään vain paastonäytteestä.

Esivalmistelu Potilas lopettaa viikkoa ennen tutkimusta mahahapon eritykseen vaikuttavien lääkkeiden käytön. Potilaan tulee olla syömättä, juomatta ja tupakoimatta 10 tunnin ajan ennen näytteenottoa. Vettä saa juoda. Koe aloitetaan aamulla klo 8 - 9.

Menetelmä Entsyymi-immunologinen. Alihankintana teetettävä tutkimus.

Näyteastia 7 ml EDTA-putki

Näyte 1-2 ml plasmaa, joka on eroteltava 30 minuutin sisällä. Eroteltuun plasmaan lisätään stabilaattoria 50 ul/1ml (Biohit, Gastrin 17 stabilizer, no 601 050). Stabilaattorin lisäyksen jälkeen näyte säilyy kolme vuorokautta huoneenlämmössä.

Tekotiheys Kerran viikossa.

Tiedustelut Kemisti Liisa Puutula-Räsänen, Peijaksen sairaalan laboratorio, puh. (09) 471 67365 ja kemisti Päivi Ranta, Jorvin sairaalan laboratorio, puh. (09) 861 2623

Allekirjoitukset Pirkko Vierikko
 vastuuyksikön päällikkö, kemisti
 Jorvin sairaalan laboratorio
 puh. (09) 861 2625

Jakelu Liisa Puutula-Räsänen, Peijaksen sairaalan laboratorio
 Asta Hirvonen, Tikkurilan terveysaseman laboratorio
 Jorvin sairaalan ylilääkärit
 Jorvin sairaalan osastot ja poliklinikat
 Jorvin sairaalan terveyskeskusosastot
 HUSLABin Intranet -sivut ⇒ muut tiedotteet ja ilmoitukset 2005