

Punktionesteiden osoitus- ja tutkimusmenetelmiä 1.4.2008 alkaen

Asia	Punktionesteiden alkuperä tai koostumus halutaan toisinaan selvittää. Yksilöimättömät pyynnöt ovat laboratoriolle hankalia. Pyyntöjen teon helpottamiseksi on tiedotteeseen koottu yhteen vaihtoehtoisia määritysmenetelmiä, joista osa on uusia. Punktionesteiden mukana tulee aina olla tieto siitä, mistä näyte on otettu. Samanaikaisesti otettu seeruminäyte tarvitaan vertailuun. Tutkimuksia tehdään arkipäivisin (ma-pe), mutta näyte voidaan ottaa myös päivystysaikana.		
Likvorin osoitus Se-Likvo-O KL 3551	Tutkimus on käytössä Meilahden sairaalan laboratoriossa. Valmistuu seuraavana arkipäivänä, erikseen sovittaessa samana päivänä. Näytemäärät: 1-5 ml eritettä ja 0,5 ml seerumia. Vastauksena annetaan lausunto.		
Chylus-osoitus Pf-Chylus nro 8687	Tutkimus on käytössä Meilahden sairaalan laboratoriossa. Tutkitaan näytteen ulkonäkö, Pf-Prot ja Pf-Trigly sekä vastaavat seerumitutkimukset. Pleuranesteen ohella voidaan tehdä askitesnesteestä. Tulos valmiina 3-7 vrk:ssa. Näytemäärät: Vähintään 2 ml punktionestettä ja 1 ml seerumia. Vastauksena annetaan lausunto.		
Virtsan osoitus -Virts-O nro 20542	Virtsan osoitus punktionesteestä on uusi tutkimus. Sisältää osatutkimukset -Krea, -Urea, ja -Prot, joiden tuloksia verrataan seeruminäytteestä saatuihin. Tulos valmiina seuraavaan arkipäivään mennessä. Näytemäärät 1 ml punktionestettä ja 1 ml seerumia. Näyte osoitetaan virtsaksi tai plasma-tyyppiseksi kudostenesteeksi. Vastauksena annetaan lausunto.		
Transsudaatin ja eksudaatin erotus -TransEx nro 20543	Transsudaatin ja eksudaatin erotus punktionesteestä on uusi tutkimus. Voidaan tehdä pleura-, peritoneaali- (askites)- tai perikardiumnesteistä. Osatutkimuksina punktionesteen Prot- ja LD-määritykset, joita verrataan seerumin vastaaviin määrityksiin. Valmistuu seuraavaan arkipäivään mennessä. Näytemäärät 1 ml punktionestettä ja 1 ml seerumia. Vastauksena annetaan lausunto.		
Tiedustelut	Lastenklinikan laboratorio, puh. (09) 471 72741, Meilahden sairaalan laboratorio (09) 471 74304 tai (09) 471 72582 (Se-Likvo-O)		
Allekirjoitukset	Lasse Uotila osastonylilääkäri HUSLAB Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74306 tai 050 427 1548	Marita Virtanen erikoislääkäri HUSLAB Lasten ja nuorten sairaalan laboratorio puh. (09) 471 73776 tai 050 427 1386	Vappu Sirén kemisti HUSLAB Töölön sairaalan laboratorio puh. 050 427 0891
Jakelu	Laboratoriojakelu Lasten ja nuorten sairaalan osastot ja lääkärit Meilahden sairaalan osastot ja poliklinikat HUSLABin intranet-sivut		