

Muutoksia punktionesteiden leukosyyttien erittelylaskennan tutkimusajoissa 2.6.2008 alkaen Jorvin sairaalan laboratoriossa

Tutkimus	2651 2657	As-Solut Pf-Solut	Askitesnesteen solut Pleuranesteen solut
Asia	<p>Askites- ja pleuranesteen solujen jatkotutkimuksena tehtävää leukosyyttien erittelylaskentaa tehdään 2.6.2008 alkaen ainoastaan arkisin klo 7 – 15 välisenä aikana. Tutkimusta ei tehdä enää päivystystutkimuksena. Mikäli punktionesteiden leukosyyttien erittelylaskentatulosta halutaan saman päivän aikana, tulee näyte toimittaa laboratorioon klo 13.30 mennessä. Tämän jälkeen toimitetuista näytteistä vastaanotetaan päivystysaikana vain solut.</p> <p>Askites- ja pleuranesteen leukosyyttien erittelylaskennassa vastataan aiemmasta poiketen myös eosinofiilit 2.6.2008 alkaen.</p> <p>Nivelnesteen ja selkäydinnesteen leukosyyttien erittelylaskennat säilyvät päivystystutkimuksina.</p>		
Näyteastia	Li-hepariiniputki 10 ml		
Näyte	<p>As- ja Pf-Solut: 2-3 ml askitesta tai pleuranestettä hepariiniputkeen. Näyte on toimitettava mahdollisimman nopeasti laboratorioon ja tutkittava tunnin kuluessa näytteenotosta, koska solut hajoavat herkästi.</p> <p>Laboratorio ei huolehdi punktaattinäytteiden esikäsittelystä ts. ei ota vastaan näytteitä esim. ruiskussa tai pussissa, vaan näytteet tulee toimittaa laboratorioon asianmukaisissa näyteastioissa. Laboratorio on toimittanut osastoille ja poliklinikoille ohjeet punktionäytteiden käsittelystä.</p>		
Teksti	As- ja Pf-Solut kaikkina vuorokauden aikoina. As- ja Pf-Diffi (leukosyyttien erittelylaskenta) 1-2 vuorokauden kuluessa.		
Tiedustelut	Jorvin sairaalan laboratorio, puh. (09) 861 2610 Hanna Asikainen ja Heli Lindfors		
Allekirjoitus	Pirkko Vierikko vastuuyksikön päällikkö, kemisti HUSLAB Jorvin sairaalan laboratorio puh. (09) 861 2625 tai 050 428 4318		
Jakelu	Jorvin sairaalan ylilääkärit Jorvin sairaalan osastot ja poliklinikat HUSLABin intra-sivut → muut tiedotteet ja ilmoitukset 2008		