

Muutoksia Multilabin kysyttävissä lisätietokentissä virtsan perustutkimusten yhteydessä

Asia

Virtsan perustutkimusten Multilabin kysyttävien lisätietojen kenttiä on muutettu 16.12.2009. Muutokset koskevat rakkoajan ilmoittamista ja ottotapaan liittyviä vaihtoehtoja seuraavissa virtsatutkimuksissa: 1881 U –KemSeul, 20033 U –Solut, 1155 U –BaktVi, 1787 U –BaktEVi, 8098 U –BaktRVi ja 1158 U –BaktVr. Samalla yhtenäistetään lisätietojen nimikentät virtsan bakteeriviljelytutkimuksissa.

Virtsanäytteen luotettavuuden varmistamiseksi tarvitaan näytteeseen liittyviä lisätietoja, mm. edellisestä virtsaamisesta kulunut aika, näytteen ottotapa ja -aika. Virtsan perustutkimuksia varten suositellaan vähintään 4 – 6 tunnin rakkoaikaa, jona aikana virtsatieinfektioita aiheuttavat bakteerit ehtivät lisääntyä.

Muutokset

Näytteen ottotapavalikkoa on muutettu Cystofix, Brickerin rakko ja Kontinentti virtsa-avanne –vaihtoehtojen osalta, ja valikkoon on lisätty vaihtoehto *Tyynyvirtsa, ei U –Solut*. Otettaessa näyte virtsatyynyä käyttäen tulee huomioida, että näytteestä ei voida luotettavasti analysoida U –Solut -tutkimusta. Tyynynäytteissä on todettu mm. virheellisesti kohonneita punasolupitoisuuksia sekä virheellisen matalia leukosyytti- ja epiteelisolupitoisuuksia.

NYKYINEN VALIKKO		VALIKKO 16.12.2009 ALKAEN	
1	Keskisuihkuvirtsa	1	Keskisuihkuvirtsa
2	Kertakatetri	2	Kertakatetri
3	Kestokatetri	3	Kestokatetri
4	Cystofix	4	Suprapub. kystost. katetri
5	Toistokatetrointi	5	Toistokatetrointi
6	Oikea pyel.katetri	6	Oikea pyel.katetri
7	Vasen pyel.katetri	7	Vasen pyel.katetri
8	Oikea ureterkatetri	8	Oikea ureterkatetri
9	Vasen ureterkatetri	9	Vasen ureterkatetri
10	Brickerin rakko	10	Virtsa-avanne
11	Kontinentti virtsa-avanne	11	Keskis.virtsa, suolirakko
12	Keskis.virtsa, suolirakko	12	Pussivirtsa
13	Pussivirtsa	13	Tyynyvirtsa, ei U -Solut
14	Rakkopunktio	14	Rakkopunktio
15	Alusastia, ei U –BaktVi	15	Alusastia, ei U –BaktVi
16	Kertav, ei pesua, ei BaktVi	16	Kertav, ei pesua, ei BaktVi
17	Muu tai ei tiedossa	17	Muu tai ei tiedossa

Rakkoajan ilmoittamiskäytäntö on muutettu niin, että edellisestä virtsaamisesta kulunut aika valitaan valmiista vaihtoehdoista < 1 h, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, > 4 h ja ? (= ei tiedossa).

Asiantuntijat

Lääkäri Martti Lalla, martti.lalla@hus.fi, (09) 471 88377, 050 427 0132, sekä kemisti Paula Pohja-Nylander, paula.pohja-nylander@hus.fi, (09) 471 76282, 050 427 0118

Allekirjoitukset	Martti Lalla osastonylilääkäri Kirurginen sairaala puh. 09 471 88377	Piia Aarnisalo osastonylilääkäri Lastenklinikan laboratorio puh. 050 427 0447	Paula Pohja-Nylander kemisti Lastenklinikan laboratorio puh. 050 427 0118
-------------------------	---	--	--

Jakelu

Laboratoriojakelu
Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit
HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot
Peijaksen sairaalan lääkärit
Jorvin sairaalan ylilääkärit
Jorvin sairaalan osastot
Lohjan yli- ja apulaisyylilääkärit
Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkärit ja osastonhoitajat
Porvoon ylilääkärit, erikoislääkärit ja sairaalalääkärit
Hyvinkään sairaalan lääkärit ja osastot
HUSLABin intranet-sivut
HUSLABin Internet-sivut
HUS:n kliiniset toimialat