

## Menetelmän, viitearvojen ja hinnan muutos S –StpnAb, 2418, S -Streptococcus pneumoniae, vasta-aineet -tutkimuksessa

<b>Tutkimus</b>	2481	S -StpnAb	S -Streptococcus pneumoniae, vasta-aineet
<b>Osatutkimukset</b>	S -Stpn14, S -Stpn18C, S -Stpn19F, S -Stpn23F, S -Stpn4, S -Stpn6B ja S -Stpn9V		
<b>Asia</b>	Menetelmämuutos Viitearvomuuotos		
<b>Johdanto</b>	S -StpnAb, 2481 -tutkimuksen menetelmä, viitearvot ja hinta muuttuvat 17.9.2012.		

Menetelmä/viitearvomuuoksen vuoksi siirtymävaiheen parinäytteet tulee analysoida samalla menetelmällä. Huolehdimme tästä seuraavalla menettelytavalla:

27.8. – 17.9.2012 välisenä aikana säilytämme I näytteen (ennen rokotusta otettu näyte, ajallisesti ensimmäinen näyte) immunologian laboratoriossa odottamassa II näytettä (rokotuksen jälkeen otettu näyte, ajallisesti myöhemmin otettu näyte), ja näytteet toimitetaan yhdessä tutkittavaksi. Lähetteen täyttö etenkin rokotuspäivämäärän osalta on tärkeää.

Tutkimus on Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitoksen immuunivasteyksikössä teetetävä alihankintatutkimus.

**Yhteyshenkilöt** lääkäri Riitta Karttunen, riitta.a.karttunen@hus.fi, 050 427 2460

**Lähete** Tulosta huolellisesti täytetty lomake ja lähete näytteen mukana. Lähete on THL:n internetsivulla, polku: [www.thl.fi](http://www.thl.fi) > Tutkimus ja kehittäminen -> Palvelut -> Kaikki palvelut A-Ö -> Rokotelähtämö -> Vasta-ainemääritykset (pneumokokki, Hib) ->Lähetteen -> Vasta-ainepitoisuus, pneumokokki S-StpnAb.THL, Vasta-ainepitoisuus, pneumokokki S-StpnAb

**Näyteastia** Seerumi-geeliputki 5 ml

**Menetelmä** Fluoroimmunomenetelmä (FMIA, multiplex-teknologia). Tutkimuksessa mitataan IgG- luokan vasta-aineet seitsemälle pneumokokkiserotyypille 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F ja 23F. Alihankintana teetetävä tutkimus.

**Tekotiheys** Neljän viikon aikana

**Tulkinta** Viitearvot:

Ikäryhmäkohtaiset ajantasaiset vasta-ainepitoisuuksien viitearvot ennen rokotusta

*HUSLABin tutkimustiedotteet julkaistaan osoitteessa  
[http://huslab.fi/ohjekirjan\\_liitteet/tutkimustiedotteet/](http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/)  
 Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista  
 ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen tai RSS-syötteen.*

ja rokotuksen jälkeen näkyvät ohjekirjassa, samoin kuin THL :n internet-sivuilla, polku: [www.thl.fi](http://www.thl.fi) > Tutkimus ja kehittäminen -> Palvelut -> Kaikki palvelut A-Ö -> Rokotelähetämö -> Vasta-ainemääritykset (pneumokokki, Hib) -> Viitearvotaulukot.

**Huomautuksia** Rokotevasteen määrityksissä I näyte tulee ottaa ennen rokotusta (päivämäärä ilmoitettava) ja II näyte aikaisintaan kahden viikon kuluttua rokotuksesta (päivämäärä ilmoitettava). Mainittava myös tutkittavalle annetut pneumokokkrokotteet, myös ajankohta (päivämäärä(t)).

**Tiedustelut** Immunologian yksikkö, puh. (09) 191 26291

<b>Allekirjoitukset</b>	Riitta Karttunen osastonylilääkäri	Maija Lappalainen osastonylilääkäri vastuuyksikön päällikkö	Martti Vaara prof., vastuualuejohtaja
	HUSLAB Immunologian yksikkö Virologian ja immunologian osasto puh. 050 427 2460	HUSLAB Virologian ja immunologian osasto puh. (09) 191 26772	HUSLAB Kliinisen mikrobiologian vastuualue puh. (09) 471 75822