

Viallista näyteputkierää lähetetty tutkimukseen B -M. tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, erityys (B –TbIFNg, 6173)

Tutkimus	6173	B -TbIFNg	B -M. tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, erityys
Asia	Viallinen näyteputkierä		
Perustelut	<p>QuantiFERON-TB Gold -näyteputkien toimittaja on ilmoittanut, että TB antigeeniputket eränumerolla A111103N ovat viallisia. Eränumero on putkien etiketin alalaidassa. TB antigeeniputken korkki on väriltään punainen. Muissa tutkimukseen kuuluvissa putkissa (nil, harmaa, mitogen, violetti) ei ole vikaa.</p> <p>Näiden viallisten putkien tilalle voitte tilata uudet TB antigeeniputket kliinisen mikrobiologian näytteiden vastaanotosta, immunologian yksikkö, puh (09)191 26291.</p> <p>Pyydämme, että palautatte käyttämättömät virheellistä erää olevat TB antigeeniputket kliinisen mikrobiologian näytteiden vastaanottoon.</p> <p>Viallisia näyteputkia on toimitettu laboratorioihin päivämäärän 8.3.2012 jälkeen. Viallisuus on voinut aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia. Viallisten putkien käyttö ei ole aiheuttanut vääriä negatiivisia tuloksia.</p> <p>Laboratorio päättää myöhemmin mahdollisista jatkotoimenpiteistä liittyen tutkimustuloksiin, jotka saatu viallisen erän käytön aikana.</p>		
Yhteyshenkilöt	<p>lääkäri Riitta Karttunen, riitta.a.karttunen@hus.fi, 050 427 2460 lääkäri Aaro Miettinen, aaro.miettinen@hus.fi, 050 427 2035</p>		
Tiedustelut	Immunologian osasto, puh. 09 191 26291 tai 050 427 9283		
Allekirjoitukset	<p>Riitta Karttunen osastonylilääkäri</p> <p>HUSLAB Immunologian yksikkö Virologian ja immunologian osasto puh. 050 427 2460</p>	<p>Maija Lappalainen osastonylilääkäri, vastuuyksikön päällikkö</p> <p>HUSLAB Virologian ja immunologian osasto puh. 09 191 26772</p>	<p>Martti Vaara prof., vastuualuejohtaja</p> <p>HUSLAB Kliinisen mikrobiologian vastuualue puh. 09 471 75822</p>