

## Veriviljelyn näyteastian muutos

**Tutkimus** 1153 B -BaktVi B -Bakteeri, viljely

**Asia** Näyteastiamuutos veriviljelyssä

**Johdanto** Veriviljelyssä siirrytään käyttämään BacT/ALERT PLUS -veriviljelypulloja. Uusissa pulloissa on vaaleita, adsorboivia partikkeleita sisältävää viljelynestettä aikaisemmin käytetyn hiiltä sisältävän viljelynesteen sijasta, minkä takia pullojen sisältö on jonkin verran eri näköistä kuin aiemmin. Pullot tulevat jatkossa korvaamaan aikaisemmat veriviljelypullot kokonaan. Vanhoja pulloja käytetään niin kauan kuin niitä riittää.

Uusia pulloja käytetään samalla tavalla kuin aikaisempia, myös näytetilavuudet säilyvät ennallaan: Aikuiset: 8-10 ml (max 10 ml) kumpaankin pulloon; lapset: anaerobipullo 5-8 ml, lasten aerobipullo 1-4 ml.

**Yhteyshenkilöt** Eveliina Tarkka, eveliina.tarkka@hus.fi, 09 191 26285 / 050 427 2496

Annika Kalanti, annika.kalanti@hus.fi, 050 428 7295

Risto Hilla, risto.hilla@hus.fi, 050 4286136

**Näyteastia** Bactalert aeroobi- ja anaerobipullot



HUSLABin tutkimustiedotteet julkaistaan osoitteessa  
[http://huslab.fi/ohjekirjan\\_liitteet/tutkimustiedotteet/](http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/)  
Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista  
ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen tai RSS-syötteen.

Pullojen tunnisteet:

aerobipullo: vihertävä korkki, FA PLUS, ref 410851  
anaerobipullo: oranssi korkki, FN PLUS, ref 410852  
pediatrinen aerobipullo: keltainen korkki, PF PLUS, ref 410853

Keskusvaraston tilauskoodit säilyvät ennallaan.

aerobipullo: Z259791  
anaerobipullo: Z259790  
pediatrinen pullo: Z259794

Pullojen säilytys: Käyttämättömät pulloet säilytetään huoneenlämmössä, pystyasennossa, suoralta auringonvalolta suojattuna.

**Tiedustelut**

Risto Hilla, Bakteriologian osasto, puh. 050 428 6136, risto.hilla@hus.fi

**Allekirjoitukset**

Pentti Kuusela  
Vt ylilääkäri, vastuuyksikön päällikkö  
HUSLAB  
Bakteriologian osasto  
puh. 050 427 0143

Martti Vaara  
Prof., vastuualuejohtaja  
HUSLAB  
Kliininen mikrobiologia  
puh. 09 471 75822