

## Seerumin ja kokoveren folaattinäytteiden suojaamisesta foliolla luovutaan

<b>Tutkimus</b>	1416	fS-Folaat	fS-Folaatti
	1414	fE-Folaat	fE-Folaatti

**Asia** Yleisasia

**Johdanto** Vertailumäärittysten perusteella on todettu, että tutkimusten 1416 fS-Folaat ja 1414 fE-Folaat näytteissä ei tarvitse käyttää näytteen suojaamiseen foliota. Näytteet suojataan kuitenkin suoralta auringonvalolta.

**Näyte ja sen säilytys** fE-Folaat: 1 ml EDTA -verta, lapset vähintään 0.5 ml. fS-Folaat: 2 ml paastoseerumia, lapset vähintään 0.5 ml. fS-Folaattinäyte ei saa olla hemolyyttinen.

Näytteet suojataan suoralta auringonvalolta, foliota ei tarvitse käyttää.

Lähetys mahdollisimman nopeasti. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. fS-Folaatti -näyte säilyy jääkaapissa neljä vuorokautta. fE-Folaatti -näyte pakastetaan, jos se ei ole perillä vuorokauden kuluessa ja näytteen mukaan liitetään kyseisestä näytteestä määritetty B –Hkr -tulos.

<b>Allekirjoitukset</b>	Leena Tervo kemisti HUSLAB Kirurgisen sairaalan laboratorio puh. 050 427 4878	Vappu Sirén vastuuyksikön päällikkö HUSLAB Kirurgisen sairaalan laboratorio puh. 050 427 0891	Esa Hämäläinen osastonylilääkäri HUSLAB Naistenklinikan laboratorio puh. 050 427 2839
-------------------------	--	--	--