

B -LyTbIFN (6174) -tutkimuksen näytteenotossa käytettävä CPT/Na-sitraatti-näytteenotto-putki vaihtuu Li-Hepariiniputkeen 2.1.2017 alkaen

Tutkimus	6174	B -LyTbIFN	<i>B -M. tuberculosis</i> -herkistyneet solut, gammainterferoni, erittävät solut
Osatutkimukset	Ly-TbSpotA, Ly-TbSpotB ja Ly-TbSpPPD		
Asia	Näyteastiamuutos		
Johdanto	Tutkimuksessa käytettävä näytteenotto-putki vaihtuu CPT/Na-sitraattiputkesta (8 ml) Li-hepariiniputkeen (7/6 ml).		
Yhteyshenkilöt	lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@helsinki.fi, 050 427 9816 sairaalamikrobiologi Annemarjut Jääskeläinen, annemarjut.jaaskelainen@hus.fi, 050 428 8017		
UUSI Näyteastia	Li-hepariiniputki 7/6 ml		
Näyte	<p>HUOM! <u>Näytteenotto-putki vaihtuu CPT/Na-sitraattiputkesta Li-hepariiniputkeen 2.1.2017, jonka jälkeen otamme vastaan vain Li-hepariiniputkia. Li-hepariiniputkien lähettämisen voitte aloittaa halutessanne jo 7.12.2016 alkaen.</u></p> <p>Näytteenottomäärä, Li-hepariiniputket: Aikuiset ja lapset yli 20 kg: 6 ml Lapset alle 20 kg: 4 ml</p> <p>Li-hepariininäytteenotto-ohjeet: Näytteen saa ottaa ainoastaan maanantaisin ja keskiviikkoisin, ei kuitenkaan arkipyhää edeltävänä päivänä. Näyte otetaan +18...+28 °C lämpöiseen Li-hepariini-putkeen ja sekoitetaan +18...+28°C:ssa. HUOM! Näytettä EI saa fuugata.</p> <p>Li-hepariininäytteen säilytys ja lähetys: Näyte on toimitettava näytteenotto-päivänä klo 13:00 mennessä HUSLABin virologian ja immunologian laboratorioon. Näytteen kuljetus huoneenlämpöisenä on varmistettava. Mahdollista bussi- tai taksikuljetusta varten on tilattavissa styrox- kuljetuslaatikko puh 09 471 73237.</p> <p>CPT/Na-sitraattiputki (2.1.2017 päättyy): Näyte otetaan +18...+28 °C lämpöiseen CPT-putkeen (8ml) ja sekoitetaan +18...+28°C:ssa. HUOM! Näytettä EI saa fuugata. Näyte lähetetään pystyasennossa.</p>		
Tekstiheys	maanantaisin ja keskiviikkoisin		

Huomautuksia	Tutkimuksessa tarvitaan eläviä lymfosyyttejä. Lämpötilan noustessa tai alittaessa huonelämpötilan näytteiden kelpoisuus tutkimukseen heikkenee merkittävästi. Arkipyhiä edeltävänä päivänä ei voi ottaa näytettä.		
Tiedustelut	Virologian ja immunologian laboratorio, Infektioserologia-työpiste, puh. 050 427 2470		
Allekirjoitukset	Annemarjut Jääskeläinen Sairaalamikrobiologi HUSLAB Virologia ja immunologia puh.050 428 8017	Hanna Jarva Erikoislääkäri HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 050 427 9816	Maija Lappalainen Ylilääkäri, linjajohtaja HUSLAB Kliininen mikrobiologia puh. 09 471 75811