

Muutos S -Kryopre-, S -Kryog- ja S -Kyhemag-näytteiden lähettämiskäytäntöön 18.4.2017 alkaen

Tutkimus	2159	S -Kryopre	Kryopresipitaatin analyysi
	3656	S -Kryog	Kryoglobuliini
	2173	S -Kyhemag	Kylmähemagglutiniinit

Asia Yleisasia

Yhteyshenkilöt lääkäri Antti Väkevä, antti.vakeva@hus.fi, 050 427 2506
 lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@helsinki.fi, 050 427 9816

Perustelut Kokoverinäytteet tulee toimittaa jatkossa laboratorioon viimeistään klo 14 näytteenottopäivänä, jotta ne ehditään käsittelemään. Muutos kellonaikaan on tehty, koska näytteitä on tullut liian myöhään, eikä niitä ole ehditty käsittelemään laboratoriossa normaalin työajan puitteissa.

Näyteastia Seerumiputki 10 ml

Näyte Seerumi. Geeliputki ei sovellu näytteenottoon.

Mikäli seerumia ei pystytä erottelemaan näytteenottopaikassa, kokoverinäyte on oltava perillä tutkivassa laboratoriossa näytteenottopäivänä klo 14 mennessä. Viikonloppuisin tai pyhäpäivinä kokoverinäytteitä ei voida lähettää laboratorioomme.

Kokoveri säilytettävä ja kuljetettava +37°C:ssa, kunnes seerumi on eroteltu, erotellaan lämpimänä.

Mikäli seerumi erotellaan jo näytteenottopaikassa, eroteltu seerumi säilytetään ja toimitetaan huoneenlämmössä tutkimuksen suorittavaan laboratorioon mahdollisimman pian (max. 3 vuorokauden sisällä). Suojattava kylmältä kuljetuksen aikana.

Tiedustelut Virologian ja immunologian laboratorio, Autoimmuno-työpiste, puh. 050 427 0328

Allekirjoitukset	Antti Väkevä erikoislääkäri HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 050 427 2506	Hanna Jarva erikoislääkäri HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 050 427 9816	Maija Lappalainen ylilääkäri, linjajohtaja HUSLAB Kliininen mikrobiologia puh. 040 838 4004
-------------------------	--	---	---