

S -PsolAb-tutkimuksen menetelmä ja viitearvot muuttuvat 17.9.2018 lähtien

Tutkimus	2459	S -PsolAb	Parietaalisolu, vasta-aineet
	9372	S -AITEndo	Endokriinisten tautien immunologiset tutkimukset
Asia	Menetelmä- ja viitearvomuutos		
Johdanto	Tutkimus siirtyy alihankinnasta tehtäväksi HUSLABin Virologian ja immunologian laboratoriossa, samalla menetelmä ja viitearvot muuttuvat. Tutkimuksen hinta säilyy ennallaan.		
Yhteyshenkilöt	lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@helsinki.fi, 050 427 9816 lääkäri Anne Toivonen, anne.toivonen@hus.fi, 050 440 8375 sairaalamikrobiologi Raisa Loginov, raisa.loginov@hus.fi, 050 427 9759		
Tiedustelut	Virologian ja immunologian laboratorio, Phadia-työpiste, puh. 050 513 0951		
Indikaatiot	Autoimmuunigastriitin ja pernisiöösien anemian diagnostiikka. S -PsolAb-tutkimus on myös AITEndo-paketin osatutkimus.		
Näyte	S -PsolAb: 0.5 ml seerumia S -AITEndo: 5 ml seerumia		
Menetelmä	Fluoroentsyymi-immunomenetelmä (FEIA).		
Tulokset valmiina	S -PsolAb:3-5 työpäivää. AITEndo: 5-12 työpäivää.		
Viitealue	normaali	alle 7	U/l
	raja-arvo	7-10	U/l
	kohonnut	yli 10	U/l
Allekirjoitukset	Hanna Jarva Erikoislääkäri HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 050 427 9816	Raisa Loginov Prosessivastaava HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 050 427 9759	Maija Lappalainen Ylilääkäri, linjajohtaja HUSLAB Kliininen mikrobiologia puh. 040 838 4004