

## S -ANCA (3612) ja S -ANCAK (9378) tutkimuspaketeista jää pois IF-tutkimukset ja tutkimuspakettien nimissä ja lyhenteissä tapahtuu muutoksia 21.3.2018 alkaen

<b>Tutkimus</b>	3612	S -ANCA	S -Neutrofiilien sytoplasma-antigeeni, vasta-aineet
	9378	S -ANCAK	S -Neutrofiilien sytoplasma-antigeeni, vasta-aineet kiireellisenä
<b>Osatutkimukset</b>	S -MPOAbG ja S -Pr3AbG		
<b>Asia</b>	Muutos tutkimuspakettien sisällöissä ja muutoksia tutkimuspakettien nimissä ja lyhenteissä.		
<b>Perustelu</b>	<p>Vaskuliittien laboratoriodiagnostiikassa MPO- ja Pr3-vasta-aineiden määrittäminen on ensisijaista. Immunofluoresenssitutkimuksessa todetaan usein vääriä positiivisia kliinisesti merkityksettömiä P - ja C -ANCA-tyyppisiä reaktioita.</p> <p>Suosittellemme vaskuliittidiagnostiikkaan ensisijaisesti S -ANCA-tutkimusta. Mikäli MPO- tai Pr3-vasta-aineita ei todeta ja vaskuliittiepäily on vahva, suosittelemme S -ANCIF-tutkimusta (KI 9365).</p> <p>Autoimmuuneihin maksatauteihin liittyvät ANCA-vasta-aineet eivät yleensä ole MPO- tai Pr3-spesifisiä, joten maksatautiin immunologiset tutkimukset -paketti (S-AITMa, 9370) sisältää edelleen ANCA-vasta-aineiden immunofluoresenssitutkimuksen.</p> <p>Tutkimusnimikkeistön yhtenäistämiseksi kiireellisenä pyydyttävän S -ANCAK-tutkimuksen lyhenne (entinen lyhenne S -ANCAbK) ja S -ANCA-tutkimuksen nimet on päivitetty.</p>		
<b>Yhteyshenkilöt</b>	lääkäri Anne Toivonen, anne.toivonen@hus.fi, 050 440 8375 lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@helsinki.fi, 050 427 9816 sairaalamikrobiologi Raisa Loginov, raisa.loginov@hus.fi, 050 427 9759		
<b>Lähete</b>	Immunologiset tutkimukset		
<b>Näyteastia</b>	Seerumi-geeliputki 5 ml		
<b>Näyte</b>	0.5 ml seerumia		
<b>Menetelmä</b>	Fluoroentsyymi-immunomenetelmä (FEIA).		
<b>Tulokset valmiina</b>	1-3 työpäivän aikana.		

**Huomautuksia** Kiireellisenä pyydetty tutkimus (S -ANCAK) vastataan tulopäivänä, jos näyte on saapunut ennen klo 16.00 (ma-pe). Uudet positiiviset löydökset ilmoitetaan hoitoyksikköön puhelimitse. Vastausta varten pyydämme ilmoittamaan ao. puhelinnumeron.

**Tiedustelut** Virologian ja immunologian laboratorio, Phadia-työpiste, puh. 050 513 0951

<b>Allekirjoitukset</b>	Anne Toivonen Erikoistuva lääkäri HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 050 440 8375	Raisa Loginov Prosessivastaava HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 050 427 9759	Maija Lappalainen Ylilääkäri, linjajohtaja HUSLAB Kliininen mikrobiologia puh. 040 838 4004
-------------------------	---	--	---