

Huume tutkimuksissa muutoksia 4.12.2019 alkaen

- Johdanto** Muutokset liittyvät HUSLABissa käynnissä olevaan kemian määrittymenetelmien ja automaatiolinjaston vaihtoon.
- Muutokset koskevat huume seulon tatutkimuksia **4221 U -Huum-O** ja **21174 U -HuumOCT**, joista jälkimmäinen sisältää positiivisten seulon tatulosten automaattisen varmistusanalyysin. Vastaavasti muutokset koskevat myös samoihin menetelmiin perustuvia suppeampia perusseuloja **8560 U -Huum-Su** ja rajoitetusti saatavilla olevaa **20718 U -Huum-PS**.
- Asiat** Menetelmämuutos
- Uusi osatutkimus 6171 U -MDMA-O
- Vastauskäytännön muutos
- Menetelmämuutos** Seulontatutkimuksissa käytettävien, uusien immunokemiallisten menetelmien herkkyydet ovat erilaiset aiempiin verrattuna. Selvimmin tämä saattaa näkyä osatutkimuksissa 2335 U -Metad-O ja 4203 U -Bupre-O, jotka ovat aiempiin menetelmiin verrattuna hieman epäherkempiä.
- Uusi osatutkimus** Osatutkimus 1055 U -Amfet-O tunnistaa heikosti MDMA-yhdisteen, minkä vuoksi huume seulon tatutkimukseen lisätään **uusi osatutkimus 6171 U -MDMA-O** (U -metyleenidioksimetamfetamiini (kval)) **ekstaasin tunnistamiseksi**.
- Seulon tatestissä positiivinen U -MDMA-O -tulos voidaan varmistaa tilaamalla tutkimus 1810 U -AmfetCt (Amfetamiini ja sen johdannaiset, virtsasta).
- Vastauskäytännön muutos** Aiemmin käytetty vastausvaihtoehto ”RAJALÖYDÖS” poistuu vastausvaihtoehtona kaikilta osatutkimuksilta. Jatkossa tutkimuksien vastaus annetaan muodossa: ”NEGAT” tai ”POSIT”.

Tutkimukset *Muutokset koskevat seuraavia tutkimuksia:*

Tutkimusnimike		Tutkimuksen nimi
U -Huum-O	4221	Huumeseulonta, kvalitatiivinen, virtsasta
U -HuumOCT	21174	Huumeseulonta, kvalitatiivinen ja positiivisten varmistus
U -Huum-PS	20718	Huumeseulonta, kvalitatiivinen
Osatutkimukset, joita muutokset koskevat		Vastausmuoto
U -Amfet-O	1055	POSIT / NEGAT
U -Bendi-O	1178	POSIT / NEGAT
U -Bupre-O	4203	POSIT / NEGAT
U -Canna-O	3455	POSIT / NEGAT
U -Koka-O	4128	POSIT / NEGAT
U -Metad-O	4335	POSIT / NEGAT
U -Opiaa-O	2435	POSIT / NEGAT
U -MDMA-O (uusi osatutkimus)	6171	POSIT / NEGAT

Tutkimusnimike		Tutkimuksen nimi
U -Huum-Su	8560	Huumeseulonta, suppea, kvalitatiivinen, virtsasta
Osatutkimukset, joita muutokset koskevat		Vastausmuoto
U -Amfet-O	1055	POSIT / NEGAT
U -Bendi-O	1178	POSIT / NEGAT
U -Canna-O	3455	POSIT / NEGAT
U -Koka-O	4128	POSIT / NEGAT
U -Opiaa-O	2435	POSIT / NEGAT
U -MDMA-O (uusi osatutkimus)	6171	POSIT / NEGAT

Tiedustelut HUSLAB asiakaspalvelu puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30 - 15.00
 HUSLABin tutkimusohjekirja: www.huslab.fi/ohjekirja

Lisätietoa Kemian analytiikan muutoksista lisätietoa (tiedote 2019.54): [https://huslab.fi/ohjekirjan liitteet/tutkimustiedotteet](https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet)

Allekirjoitukset

Janne Backman
professori,
ylilääkäri
HY ja HUSLAB
Kliininen
farmakologia
puh. 050 428 0997

Tea Lamberg
erikoistuva
kemisti
HUSLAB
Automaatio-
laboratorio
puh. 040 183 1877

Christel Pussinen
prosessivastaava
HUSLAB
Automaatio-
laboratorio
puh. 050 427 9789

Lotta Joutsu-Korhonen
ylilääkäri
HUSLAB
Kliininen kemia ja
näytteenottopalvelut
puh. 050 427 2402