

Komplementin aktivaatiotutkimus (P -CAkt; 10470) otetaan käyttöön 1.10.2021

Tutkimus	10470	P -CAkt	P -Komplementin aktivaatiotutkimus
Osatutkimukset	4545	P -C3	P -Komplementti C3, plasmasta
	22206	P -C3d	P -Komplementti C3, aktivaatiotuotteet (C3d)
	4546	P -C4	P -Komplementti C4
	22207	P -C4d	P -Komplementti C4, aktivaatiotuotteet (C4d)
	6091	P -FakB	P -Faktori B
	223	P -FakBb	P -Komplementti Faktori B, aktivaatiotuotteet
	10982	P -SC5b-9	SC5b-9 kompleksi

Asia HUSLAB tarjoaa uuden tutkimuksen P -CAkt komplementin aktivaatioon osoittamiseen plasma- tai kudostenäytteestä. Kyseessä on alihankintana teetettävä tutkimus.

Yhteyshenkilöt lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@hus.fi, 050 427 9816
 lääkäri Eliisa Kekäläinen, eliisa.kekalainen@hus.fi, 050 427 9344

Näyteastia 10 ml EDTA-putki

Näyte Näyte sentrifugoidaan mahdollisimman nopeasti (30 min sisällä näytteenotosta). Plasma erotellaan ja jaetaan kolmeen 1 ml erään, jotka pakastetaan välittömästi ja lähetetään pakastettuna. Pleuraneste, synovianeste ja likvori otetaan EDTA-putkeen ja käsitellään kuten plasma.

Menetelmät Nefelometrinen, immunoelektroforeettinen, entsyymoimmunologinen ja immunodiffuusiomääritys.

Viitearvot

P -C3	0.65-1.32 g/L
P -C3d	<7 U/ml
P -C4	0.11-0.32 g/L
P -C4d	<7 U/ml
P -FakB	0.10-0.40 g/L
P -FakBb	<4.0 ug/ml
P -Sc5b-9	<366 ng/ml

Tulkinta Tuloksista annetaan lausunto

Tulokset valmiina Kolmen viikon kuluessa

Tiedustelut Virologian ja immunologian yksikkö, puh. 09 471 73220

Allekirjoitukset

Eliisa Kekäläinen
Erikoislääkäri
HUSLAB
Virologia ja immunologia
puh. 050 427 9344

Hanna Jarva
Osastonylilääkäri
HUSLAB
Virologia ja immunologia
puh. 050 427 9816

Maija Lappalainen
Ylilääkäri, vastualuejohtaja
HUSLAB
Virologia ja immunologia
puh. 09 471 75811