


CA 19-9 Antigeeni -tutkimuksen (S -CA19-9) tulostaso- ja viiteväli- muutos 1.2.2023 alkaen

Tutkimus 3412 **S -CA19-9** CA 19-9 Antigeeni, seerumista

**Tulostaso-
muutos** Laitevalmistaja parantaa CA19-9 -menetelmän toistettavuutta ja jäljitettävyyttä kansainväli-
seen standardiin. Menetelmän tulostaso nousee keskimäärin 20 % 1.2.2023 alkaen (ks. korre-
laatiokuva). Pitoisuustasolla alle 100 kU/l tämä tarkoittaa n. + 10-15 kU/l tasomuutosta.

Yksittäisillä potilailla tai yksittäisissä näyt-
teisissä muutos voi olla erisuuruinen tai
suuntainen kuin keskimääräinen, mikä tu-
lee ottaa huomioon erityisesti seurantapoti-
laiden tulosten tulkinnassa.

Vastattuihin tuloksiin liitetään 6 kk ajan
lausunto tulostasomuutoksesta.

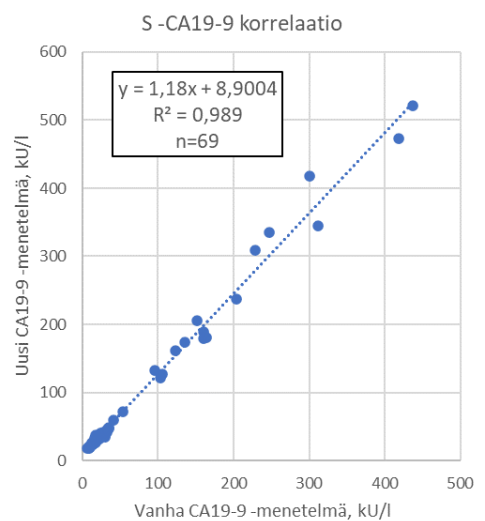

Uusi viiteväli **alle 37 kU/l** (vanha viiteväli alle 26 kU/l)

Tulostason nousun vuoksi otamme käyttöön menetelmävalmistajan aineistoon perustuvan uuden viitevälin. Aineiston mukaan 96 % oletettavasti terveiden henkilöiden (n=600) tulok-
sista asettuu uudelle viitevälille.

Lisätietoja HUS Diagnostiikkakeskus tutkimusohjekirja: www.huslab.fi/ohjekirja

Allekirjoitukset	Mikko Anttonen	Titta Salopuro	Lotta Joutsu-Korhonen
	Osastonylilääkäri	Kemisti	Ylilääkäri, vastuualuejohtaja
	HUS Diagnostiikkakeskus	HUS Diagnostiikkakeskus	HUS Diagnostiikkakeskus
	Kliininen kemia	Kliininen kemia	Kliininen kemia
	Automaatiolaboratorio	Automaatiolaboratorio	
	puh. 050 4644 654	puh. 040 486 9961	puh. 050 427 2402