

Ohje käytössä: PREANALYTIikka

Bakteerivärjäysnäyte

HUSLAB Bakteriologia

Tutkimuspyyntö ja näyte


1159 -BaktVr, -Bakteeri, värjäys

Tutkimusta käytetään bakteereiden nopeaan osoittamiseen normaalisti steriileistä kehonosista otetuista näytteistä. Näytteeksi sopii esim. punktioneste (nivel-, askites-, pericardiumneste) tai koepala. Näyte lähetetään steriilissä putkessa tai objektilasille levitettynä. Geelikuljetusputki tai veriviljelypullo ei ole sovelias värjäysnäytteille. Värjäyksen lisäksi samasta näytteestä on syytä ottaa myös bakteeriviljelynäyte.

19365 FI-BaktVr, Bakteeri, värjäys, emätineritteestä

Näytteeksi otetaan emätineritettä emättimen limakalvolta. Näyte levitetään näytteenottotikulla suoraan objektilasille.

Värjäyslasin valmistus

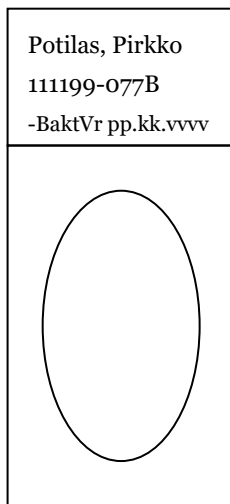

Lasin hiososaan (mattapintaan) kirjoitetaan lyijykynällä potilaan henkilötiedot, pyydetty tutkimus ja näytteenottopäivämäärä tai liimataan näytetarra.

Näyte sivellään varovasti ympyröidylle alueelle, samalle puolelle kuin potilastiedot. Erittäin niukka näyte levitetään lasin keskelle pienelle alueelle. Näyte ilmakuivataan.

Värjäyslasi lähetetään laboratorioon omassa kuljetuskotelossa, johon on liimattu viivakoodillinen tunnistetarra.

Näytteen säilytys

Näyte toimitetaan laboratorioon mahdollisimman nopeasti. Kuljetusta odottaessa säilytetään huoneenlämmössä. Yli vuorokauden säilytys jääkaapissa. Värjäyslasit säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Tiedustelut: Bakteriologian laboratorio puh. (09) 471 730 40.