

Ohje käytössä: PREANALYTIikka

Bakteeriviljelynäyte: katetrin ja kanyylin kärjet, kierukka

HUSLAB Bakteriologia

Tutkimuspyyntö

1156 -BaktVi, Bakteeri, viljely

Tutkimuspyynnössä tulee ilmetä potilastietojen lisäksi kanyylin tai katetrin nimi ja anatominen sijainti, näytteenottoaika ja haluttu tutkimus.

Välineet

- geelikuljetusputki*
- kertakäyttökäsineet
- steriilejä sidetaitoksia
- 70 % etanoliliuosta (tai muuta desinfektioainetta)
- steriilit pinsetit ja sakset

* Tarkoitukseen sopivia isokokoisia geelikuljetusputkia on saatavissa tilauksesta HUSLABin näytteiden vastaanotosta puh. 09 471 72563.

Näytteenotto: katetrin ja kanyylin kärjet

Iho desinfioidaan kanyylin ympäriltä. Kanyyli poistetaan aseptisesti ja siitä leikataan noin 5 cm pituinen pala eli mielellään vain se osa, joka on ollut verisuonen sisällä, suoraan kuljetusputkeen. Pala painetaan kuljetusputken geelin sisään, kuitenkin niin, että pieni osa jää geelin pinnalle näkyviin, josta se laboratorioissa saadaan esille viljelyä varten. Näyte toimitetaan tutkivaan laboratorioon mahdollisimman pian.

Näytteenotto: kierukka

Kierukka lähetetään bakteeriviljelyyn geelikuljetusputkessa geelin sisään työnnettynä.

Näytteen säilytys

Näyte toimitetaan laboratorioon mahdollisimman nopeasti. Kuljetusta odotettaessa säilytetään huoneenlämmössä. Yli vuorokauden säilytys jääkaapissa.

Tiedustelut: Bakteriologian laboratorio puh. (09) 471 730 40.