

Ohje käytössä: HUS ETEVA Hämeenlinnan ja Lahden toimipisteet

Näytteiden pakkaaminen ja lähettäminen ETEVA Hämeenlinnan ja Lahden toimipisteistä Hyvinkään sairaalan laboratorioon

Tämä ohje on tarkoitettu ETEVA Hämeenlinnan ja Lahden toimipisteiden näytteiden lähettämiseen Hyvinkään sairaalan laboratorioon. Näytteet kuljetetaan aluekuljetuksen (ELF) toimesta Hyvinkään sairaalan laboratorioon analysoitavaksi. Hyvinkään sairaalan laboratorio lähettää ne näytteet eteenpäin, joita eivät itse analysoi.



Pakkaa näytteet styrokslaatikkoon. 3-5ml näyteputket pakataan reikästyrokslaatikkoon ja 7-10ml näyteputket ontoon styrokslaatikkoon.

Muut näytteet, esimerkiksi bakteeriviljelyt pakataan minigrip-pussiin.

Jokaisessa putkessa on oltava asiakkaan nimi, henkilötunnus ja näytteenoton päivämäärä ja aika. Merkitse styrokslaatikko KÄSILAJITTELU tarralla. Käytä KIIRE tarraa, jos mukana kiirenäytteitä.

Ohje käytössä: HUS ETEVA Hämeenlinnan ja Lahden toimipisteet

Tarrapohjat löytyvät:

https://huslab.fi/intra/preanalytiikan_kasikirja/naytteiden_vastaanottaminen_ja_kasittely/aluekuljetustarrat/kiire.pdf

https://huslab.fi/intra/preanalytiikan_kasikirja/naytteiden_vastaanottaminen_ja_kasittely/aluekuljetustarrat/kasilajittelu.pdf

Pakkaa merkatut styrokslaatikot ja muut näytteet mustan näytekuljetuslaukun sisäpussiin. Sulje sisäpussi pussinsulkijalla. Sulje näytekuljetuslaukku

Käännä näytekylltti näytekuljetusasentoon ennen lähettämistä. (Kuvan esimerkki Laakson sairaalan – HUSLAB-talon näytekuljetuslaukusta)



Laukku ja tyhjt styrokslaatikot palautuvat seuraavassa kuljetuksessa. (Kuvan esimerkki HUSLAB-talo – Myyrmäki näytekuljetuslaukusta)



Ohje käytössä: HUS ETEVA Hämeenlinnan ja Lahden toimipisteet

Muutoshistoria (jos tarvitaan)	