

Ohje käytössä: HUSLAB ja asiakkaat


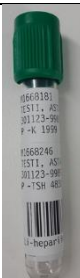
## Veriputkien merkitseminen

### Putken täyttöaste on normaali

1. Tarra pystysuoraan korkista alaspäin suoraan ja sileästi
2. Putkessa oleva nestepinta on näkyvässä
3. Teksti on luettavissa korkista alaspäin



### Tapaukset, joissa putken liimataan useampi tarra

Yksi tutkimus, jolle tulostuu kaksi tarraa	Kaksi tai useampi tutkimusta otettu yhteen putkeen
Liimaa ensimmäinen tarra pystyyn, toinen poikittain, niin että alempi viivakoodi ei ole luettavissa	Liimaa kaikki tarrat poikittain
	

### Avatut putket

Jos näyteputki on avattu näytteenoton yhteydessä, merkitään viivakooditarraan "A".



Ohje käytössä: HUSLAB ja asiakkaat

## Mikroputki

1. Tarra pystysuoraan korkista alaspäin
2. Jos useita pyyntöjä samasta putkesta, vain yksi tarra liimataan pystyyn putkeen. Muut tarrat näytteen kanssa minigrip-pussiin



## Infektiohälytysnäytteet (esim. Mers, Korona, Ebola...)

Täytteet tulee pakata erillispakkaukseen, joka merkitään **"INFEKTIOHÄLYTYS"**. Koronanäytteiden pakkausohjeet löytyvät HUS-intrassa koronaohjeistuksissa.

Muiden infektiohälytysnäytteiden pakkaus- ja lähetysohjeet tulee aina tiedustella HUSLABin mikrobiologian yksiköstä p. 050 427 0476/ 040 838 4009/ 050 427 2127 päivystysaikana: p. 040 837 4010/ p. 040 837 4011.

## Kiirenäytteet

Kiireellinen näyte on merkitty automaattisesti tulostuvalla värimerkinnällä tai ylärivin alleviivauksella. Jos tarrassa ei ole edellä mainittuja kiiremerkintöjä, tarra väritetään ylivivivauskynällä.



Veriputkien merkitseminen | HUSLAB | Laatiijat: Annemari Kuusisto, Christel Pussinen, Jessica Ehrstén | Hyväksyjä: Hannele Kangas | 28.9.2021

[https://huslab.fi/intra/preanalytiikan\\_kasikirja/naytteiden\\_vastaanottaminen\\_ja\\_kasittely/verinayteputkien\\_merkitseminen.pdf](https://huslab.fi/intra/preanalytiikan_kasikirja/naytteiden_vastaanottaminen_ja_kasittely/verinayteputkien_merkitseminen.pdf)