

Ohje käytössä: Diagnostiikkakeskus

Virtsanäytteet virologisiin tutkimuksiin

Diagnostiikkakeskus/ preanalytiikka / virologian ohje /toimintaohje

Näyte ja näyteastia

Virtsa tehdaspuhtaassa, kierrekorkillisessa muoviputkessa (aikuiset 10 ml, lapset 4 ml).

Näytteen lähetys ja säilytys

CMV-tutkimus. Näyte tulee kuljettaa laboratorioon mieluiten välittömästi. CMV-tutkimukseen otetut näytteet voidaan säilyttää lyhytaikaisesti (enintään 3 vrk) -20C:ssa, tällöin näytteet on myös lähetettävä pakastettuna.

Polyoomavirus-tutkimus (BKV- ja JCV). Näyte tulee kuljettaa laboratorioon mieluiten välittömästi. Lyhytaikainen säilytys (enintään 3 vrk) jääkaappilämpötilassa, pitkäaikaista säilytystä (yli 3 vrk) varten suositellaan näytteen säilytystä ja lähettämistä pakastettuna.

Näytekuljetus tapahtuu tavallisena postikuljetuksena diagnostisiin näytteisiin sovellettavan ohjeen (UN 3373) mukaan.