

1881 U -KemSeul

Virtsaputki BD lisäaineeton



← max

← min 2,5 ml

Putki 11 ml
REF 364915

Näyte säilyy :
8 h + 20°C (1 vrk + 4°C)

20033 U -Solut 1941 U -Diffi

Virtsaputki BD säilöntäaine



← max

← ehdoton
minimi 6 ml

Putki 10 ml
REF 364955

Näyte säilyy :
1 vrk + 20°C (3 vrk + 4°C)

1155 U -BaktVi 1787 U -BaktEVi

Virtsaputki BD säilöntäaine



← max

← ehdoton
minimi 2,5 ml

Putki 4 ml
REF 364958

Näyte voidaan ottaa myös 10ml:n BD:n
säilöntäaineelliseen putkeen (REF 364955)

Näyte säilyy :
1 vrk + 20°C (2 vrk + 4°C)

- Siirrä virtsanäyte säilöntäaineellisiin putkiin ½ tunnin kuluessa näytteenotosta.
- **Täytä jokaiselle tutkimukselle oma putki.**
- Mikäli putkien korkit joudutaan avaamaan, tulee huomioida, että näytettä on vähintään minimimäärä. Putken maksimimäärä on etiketin yläreuna.
- Sekoita virtsanäyteputki huolellisesti kääntelemällä 8 - 10 kertaa ylösalaisin!
- Näytteenottoaika täyttää atk:lle esitiedot: ottotapa, rakko aika, päivämäärä, kellonaika ja lääkitys
- Näyteputken vastaanottaja tallentaa käsinkirjoitetut esitiedot atk:lle.